

Memo Präanalytik - Proben aus einer Urotube

Benötigtes Material

Urotube, welcher vom Labor bereitgestellt wird
Verwenden Sie einen sterilen Becher, um den Urin zu sammeln.



Probe

"Zweitstrahl-" oder "Mittelstrahlurin".

Erster Morgenurin nach dem Aufstehen oder nach mindestens zwei Stunden Retention (Verhalten).
Die Probe muss vor der Einnahme von Medikamenten oder Antibiotika entnommen werden!

Urintnahme

- Hände gründlich mit Seife waschen und mit einem Einwegpapiertuch oder einem sauberen Tuch abtrocknen.
- Genitalbereich mit sterilen Kompressen und Leitungswasser reinigen. Keine Seife verwenden, da diese die Ergebnisse beeinträchtigen kann.
 - ♀ Bei Frauen Vulva und Harnröhrenausgang reinigen
 - ♂ Bei Männern Eichel und Harnröhrenöffnung reinigen.
- Die erste Portion des Urins in die Toilette laufen lassen, danach den Rest in einen sterilen Becher urinieren. Darauf achten, dass das Innere des Bechers nicht mit den Fingern oder der Kleidung berührt wird.
 - ♀ Frauen halten während der Entnahme die Schamlippen gespreizt.
 - ♂ Männern halten während der Abgabe die Eichel frei.

Inokulation der Urotube

Siehe Rückseite

Inkubation und Aufbewahrung

24 Stunden bei 37°C inkubieren oder bei Raumtemperatur stehen lassen und so rasch wie möglich ins Labor schicken.

Ungültige Proben

- Verfallsdatum der Urotube überschritten
- Ungünstige Bedingungen für die Aufbewahrung der Urotube
- Schlechter Zustand der Dip-Slides
- Vorhandensein von Urin in der Urotube
- Nicht identifizierte Proben

Inokulation der Dip-Slides



1. Urotube öffnen und Agarträger kurz in den Urin tauchen.
Der Agar muss vollständig eingetaucht sein, darf aber nicht länger als 10 Sekunden im Urin verbleiben.



2. Wenn die Urinmenge nicht ausreicht, um den Agar zu bedecken, den Urin vorsichtig über die gesamte Fläche beider Agaroberflächen giessen.



3. Objektträger herausnehmen und über einem Papiertuch sorgfältig abtropfen lassen, ohne dabei das Agarose-Gel zu berühren.
Es darf sich kein Urin in der Flasche befinden.



4. Den Objektträger wieder in die Urotube einlegen, gut verschliessen und das Röhrchen anschreiben (NAME, VORNAME, GEBURTSDATUM).

Kontakt

Isabelle Antonioli-Revaz, FAMH in Mikrobiologie

Ihr Labor zu Ihren Diensten :

7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag unter Tel. +41 (0)27 451 24 51

info@laboratoiresalamin.ch

www.laboratoiresalamin.ch

